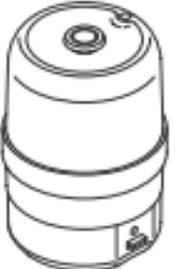
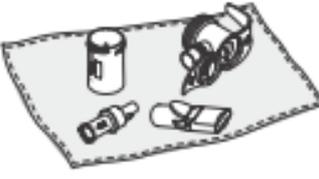
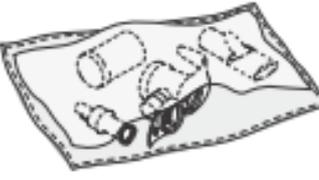


Comment nettoyer mon aérosol

- La durée de la séance dépend du volume à nébuliser. Comptez environ 5 minutes pour 3 ml et environ 12 minutes pour 5 ml.
- La séance est terminée quand le nuage ne sort plus (même s'il reste du médicament au fond de la cuve). Ce volume résiduel (0.5 à 1 ml) est inévitable et doit être jeté.
- Le nébuliseur doit être nettoyé après chaque séance et désinfecté 1 fois par jour à l'eau bouillante (voir ci-dessous).

<p>1</p>  <p>Nettoyage (après chaque séance)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jeter le volume résiduel de médicament.• Démontez le nébuliseur complètement (4 pièces).• Nettoyer toutes les pièces avec du détergent et de l'eau chaude.• Rincer toutes les pièces sous l'eau courante.	<p>2</p>  <p>Désinfection</p> <ul style="list-style-type: none">• Faire bouillir dans l'eau le nébuliseur au moins 15 minutes ou : <ul style="list-style-type: none">• passez-le dans un désinfecteur à vapeur pour biberons pendant au moins 15 minutes.	<p>3</p>  <p>Séchage</p> <ul style="list-style-type: none">• Laisser sécher les pièces du nébuliseur démonté sur une surface propre et sèche. Les pièces seront complètement sèches en environ 4 heures.
<p>4</p>  <p>Conservation / rangement</p> <ul style="list-style-type: none">• Garder le nébuliseur dans un tissu propre et non pelucheux dans un endroit sec.	<p>5</p>  <p>Renouvellement</p> <ul style="list-style-type: none">• Remplacez le nébuliseur LC SPRINT SP et sa tubulure au bout de SIX SEMAINES D'UTILISATION.	

Source : société PARI