



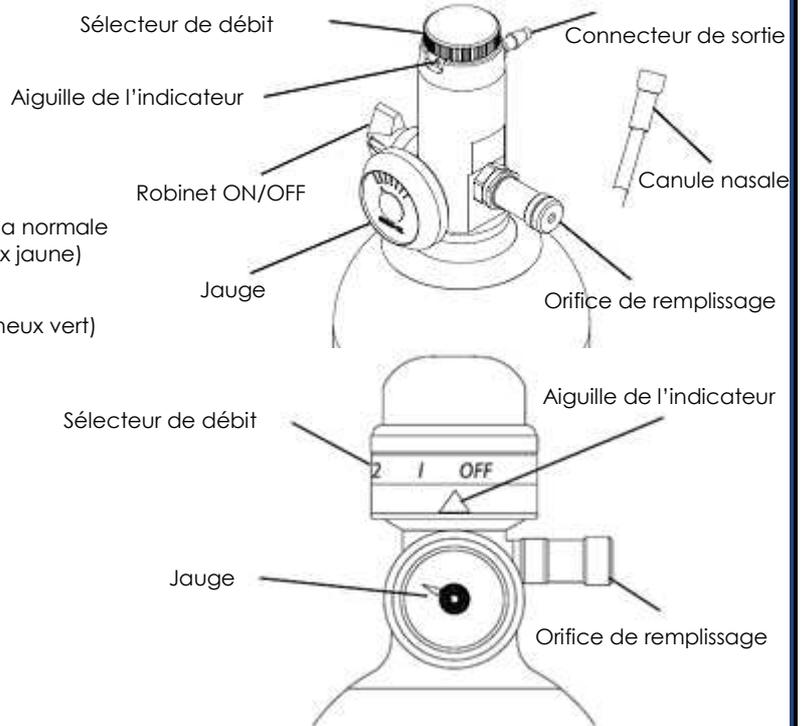

Yes, you can.®

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE *Invacare®HomeFill® II*

Merci d'avoir choisi **HomeFill II**. Ce guide de démarrage rapide ne remplace en aucun cas le manuel de l'opérateur. Il a pour but de guider le patient uniquement dans les différentes étapes de fonctionnement de cet appareil.

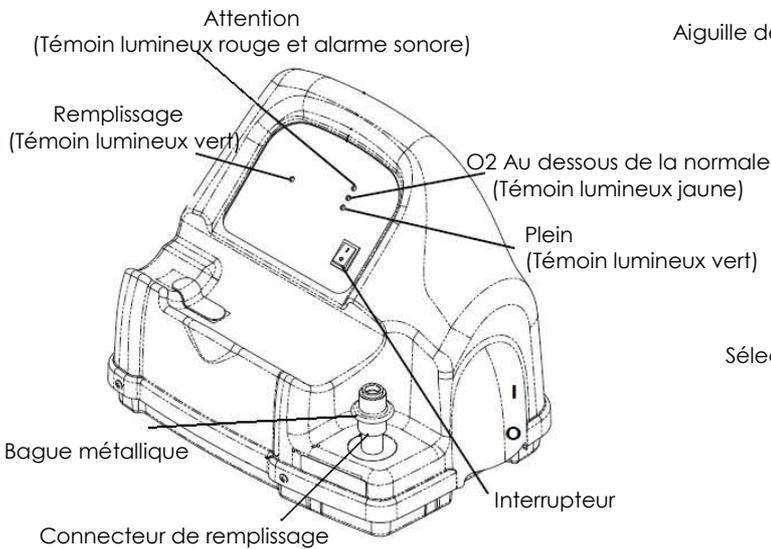

1. Brancher le **HomeFill II**.



2. Allumer votre concentrateur d'oxygène **Invacare**.



3. Raccorder le compresseur **HomeFill II** à votre concentrateur d'oxygène.



4. Pour remplir la bouteille en débit continu, mettre en position 0 et ouvrir le robinet ON/OFF. **Le laisser ouvert sur ON.**



4'. Pour remplir la bouteille avec valve en débit pulsé et continu, **mettre en position off.**



5. Abaisser la bague métallique avant d'enclencher la bouteille. Les points verts du connecteur apparaissent.



6. Enclencher sans efforts la bouteille dans le connecteur de remplissage du compresseur **HomeFill II**.



7. Vérifier que le **débitmètre de votre concentrateur soit réglé sur le débit prescrit par votre médecin** (centre de la bille sur le trait).



Yes, you can.®

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Invacare®HomeFill® II

Merci d'avoir choisi **HomeFill II**. Ce guide de démarrage rapide ne remplace en aucun cas le manuel de l'opérateur. Il a pour but de guider le patient uniquement dans les différentes étapes de fonctionnement de cet appareil.



8. Allumer le compresseur **HomeFill II**. Le voyant orange «O2 en dessous de la normale» s'allume. **Attendre entre 3 et 10 minutes** avant que le voyant vert «remplissage» s'allume.



9. Durée de remplissage, **environ 2H** sur une bouteille de 1,7L. La bouteille possède une jauge qui vous permet de vérifier son niveau de remplissage. La bouteille est pleine à 2000 Psi (zone verte).



10. Le voyant vert «Plein» s'allume en façade du compresseur pour indiquer que la bouteille est pleine.



11. Une fois remplie, le compresseur s'arrête automatiquement mais il est nécessaire d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour l'éteindre complètement. Eteindre le concentrateur si nécessaire.



12. Pour retirer la bouteille du **HomeFill II**, il suffit d'**abaisser la bague métallique** du connecteur de remplissage tout en maintenant la tête de la bouteille. Puis enlever la bouteille.



13. Connecter la canule nasale à la bouteille.



14. Sur la bouteille à débit continu. Ouvrir le robinet sur ON et régler la position de débit selon la prescription médicale. Lorsque la bouteille n'est plus utilisée, mettre le sélecteur de débit sur 0 et fermer le robinet sur OFF.



15. Sur la bouteille avec valve en débit pulsé et continu, régler sur la position de débit prescrite par votre médecin. Pour la fermer mettre sur position OFF.



**Pendant le remplissage d'une bouteille par le HomeFill II, le débit d'utilisation du concentrateur ne doit pas dépasser :
2,5 L/min sur un concentrateur 5 L
5 L/min sur un concentrateur 9 L**

Autonomie des bouteilles

Bouteille en débit continu 1,7L :

Débit continu en l/mn	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Autonomie moy.	16h	8h	5h20	4h	2h40	2h	1h30	1h20	1h	50mn	40mn

Bouteille en débit pulsé/continu 1L :

Débit pulsé	1	2	3	4	5
Autonomie moy.	9h18	5h54	4h30	3h36	3h
Débit continu en l/mn		2			
Autonomie moy.		1h20			

Bouteille en débit pulsé/continu 1,7L :

Débit pulsé	1	2	3	4	5
Autonomie moy.	14h18	9h06	6h54	5h36	4h42
Débit continu en l/mn		2			
Autonomie moy.		2h			