

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

En plus de l'appareil, l'emballage contient les accessoires nécessaires à l'utilisation de l'appareil et un manuel d'utilisation. Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez que vous disposez des pièces suivantes : concentrateur; batterie, sac de transport, alimentation AC, alimentation DC, chariot. Inspectez toujours l'appareil et ses accessoires avant utilisation pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.

Utilisez l'appareil dans son sac de transport, placé dans un chariot ou, utilisez le, posé à la verticale sur une table ou sur le sol dans son sac de transport. Toujours utiliser l'appareil dans des endroits correctement ventilés.



1. Ouvrez le compartiment de la batterie en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur le couvercle. Vous pouvez insérer jusqu'à 2 batteries dans le compartiment de la batterie.



2. Fermer le capot du compartiment de la batterie pour s'assurer qu'elle soit correctement fixée.



3. Connectez l'alimentation AC/DC en branchant le connecteur rond dans le réceptacle sur le côté du concentrateur.



4. Branchez l'autre extrémité de l'alimentation AC/DC dans une prise. Faites toujours attention lors de l'insertion de la fiche dans la prise. Le concentrateur d'oxygène Zen-O™ peut aussi être alimenté en utilisant la puissance du courant continu dans un véhicule ou d'une source de puissance comparable.



5. Connectez le tube au port de la canule. Pour connecter la canule au patient, suivez toujours les instructions du fabricant.



6. Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur la touche marche/arrêt. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez et maintenez la touche marche/arrêt.



7. Sélectionnez le débit prescrit par votre médecin et respirez normalement. La cadence du débit peut être ajustée en pressant le bouton de l'appareil + et -.

